


## 使用方法

---

1. ディスポカバーを被せ、ボタンを押し電源を入れます。

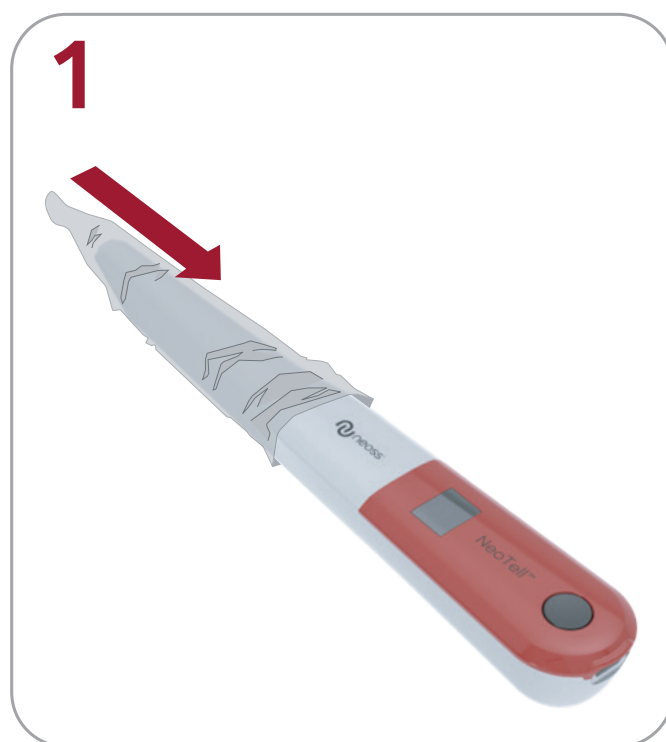

## 使用方法


---

2. スマートペグをスマートペグマウントに挿入し、約 4 ~ 6Ncm の指の力で、インプラントにスマートペグを装着します。この時にスレッド部の破損を防ぐためにスマートペグを絞めすぎないようにしてください。



## 使用方法


3. ネオテル本体を口腔内に挿入し、本体先端部をスマートペグから2-4mm 離して、約 45° の角度で計測を行います。

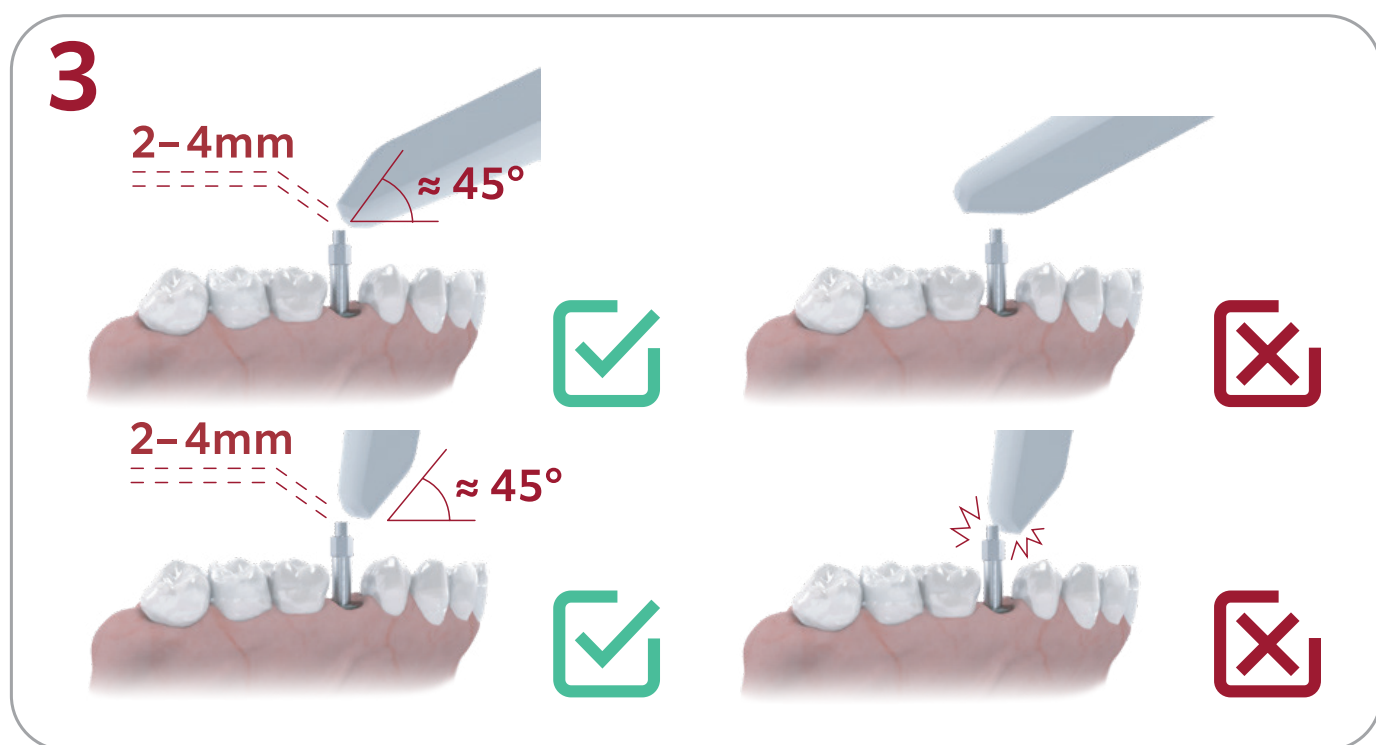

## 使用方法

---


4. 初めに頬舌方向の ISQ 値を測定します。  
測定完了時に音が鳴り、測定データがディスプレイに表示されます。  
口腔外で数値を確認します。

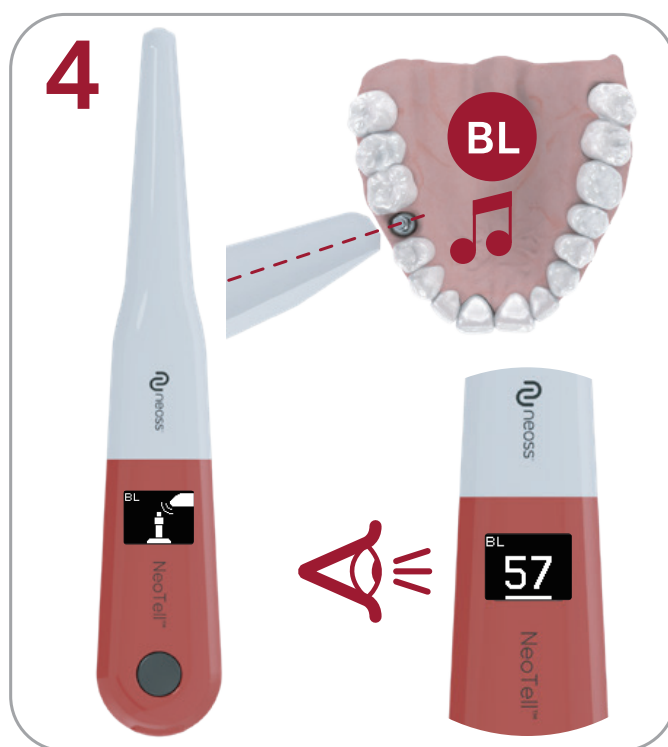

## 使用方法

---

5.4と同様に、近遠心方向へのISQ値を測定します。

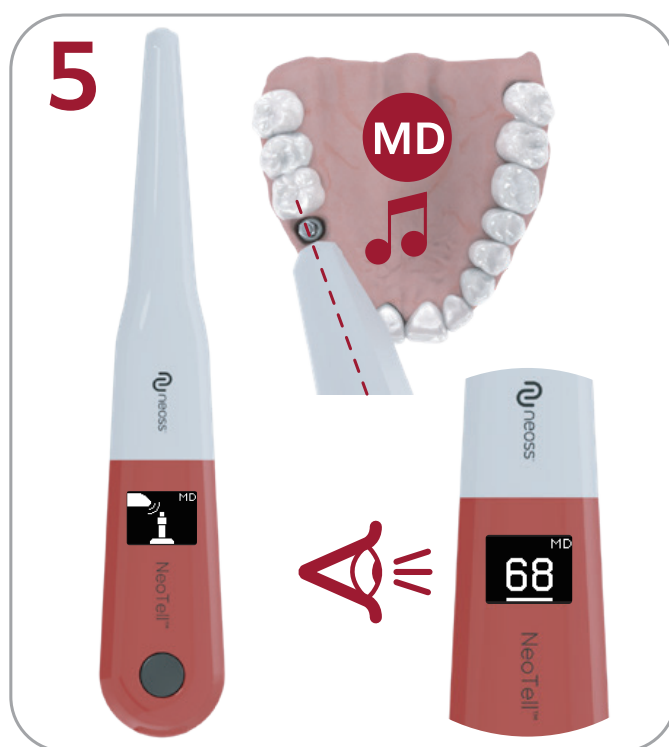

## 使用方法

---

6. 頬舌方向、近遠心方向それぞれの ISQ 値が表示されます。



## 使用方法

---

7. 再測定する場合、ボタンを押すことで再測定の画面に切り替わります。

